

**BONNEHEURE®**

# LÉKAŘSKÝ REKOMBINANTNÍ KRÉM S LIDSKÝM KOLAGENEM - NÁVOD K POUŽITÍ

[Název produktu] Lékařský rekombinantní krém s lidským kolagenem

[Model/Specifikace]: 5 g/tuba, 20 g/tuba, 50 g/tuba, 95 g/tuba

[Složení] :Produkt obsahuje rekombinantní typ III humanizovaného kolagenu, zvlhčovačlo, emulgátor, hydroxyfenylát, fenoxetylalol a vodu.

[Určení] Je vhodný k péči o nechronické rány (např. poškození kožní bariéry způsobené vředy na obličeji) a okolní kůži. Používá se pouze jako mechanická bariéra.

[Vlastnosti] Produkt by měl být mléčně bílý nebo mírně nažloutlý krém, bez viditelných nečistot. Tuba by měla být čistá, její obsah by neměl vytékat, a neměla by obsahovat žádné ostré hrany či jiné vady.

[Kontraindikace] Osoby alergické na bílkovinné produkty by produkt neměly používat. Používejte s opatrností u těhotných a kojících žen.

[Pokyny] Místní vnější použití. Očistěte kůži a naneste krém. Používejte dvakrát denně nebo podle pokynů lékaře po dobu dvou týdnů.[Bezpečnostní opatření] 1.Nepoužívejte, pokud: Produkt je po datu expirace. Obal je poškozen.

Pouze pro vnější použití na pokožku, nepolykejte. Pokud se objeví pálení, zarudnutí nebo otok, přestaňte produkt používat, opláchněte a v případě potřeby se poradte s lékařem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Produkt je doporučeno používat samostatně. Pokud je nutná kombinace s jinými produkty, konzultujte s lékařem. Mléčně bílá, mírně nažloutlá barva je normální a neovlivňuje účinnost produktu. Produkt je určen pro doplňkovou léčbu kožních ran, které nevyžadují aseptický zásah.. [Upozornění] Pečlivě si přečtěte návod k použití nebo jej použijte pod dohledem lékaře.

[Balení] Tento výrobek je balen ve skleněných lahvičkách: 1 kus/krabička.

















[Skladování a přeprava] Tento přípravek se skladuje v uzavřených prostorech a skladuje se při pokojové teplotě.

Kryogenní zmrazení a přetavení, nemá vliv na účinek nebo vlastnosti.

[Datum výroby] Podrobnosti naleznete na štítku na obalu.

[Doba použitelnosti] Dva roky/datum expirace na krabičce.

## Kategorie symbolů/vysvětlivky

	Označení "CE "		Nepoužívejte, pokud je obal poškozený
	Zdravotnické prostředek		Přečtěte si návod k použití
	Katalogové číslo		Upozornění
	Číslo šarže		Výrobce
	Datum spotřeby		Datum výroby
	Nesterilní		Autorizovaný zástupce
	Chraňte před slunečním zářením		Jedinečný identifikátor zařízení
	Udržujte v suchu		Nepoužívejte opakovaně



[Výrobce] Shandong D-Nutrimec Biomedical Co., Ltd  
[Výrobní adresa] 218 meters east of the intersection of Qingnian Road and Dingdang Road in Tianzhong Street, Dingtao District, Heze City, Shandong Province, China,274100  
[Tel] 0086-530-6277775  
[Email] dnutrimec@gmail.com

[Název] Humiss Beratung GmbH  
[Adresa] Gneisenaustraße 8.40477,Düesseldorf,Deutschland  
[SRN] DE-AR-000023447  
Vyrobeno v Číně

[Datum revize] Jan-01-2024

Rev.:A/1