

BONNEHEURE®

LÉKAŘSKÁ REKOMBINANTNÍ MASKA S LIDSKÝM KOLAGENEM - NÁVOD K POUŽITÍ

[Název výrobku] : Lékařská Rekombinantní Maska s lidským kolagenem

[Model] Kulatá.

[Specifikace] : 25g/kus. 5 kusů v balení

[Hlavní složení struktury] Tento produkt obsahuje rekombinantní typ III humanizovaného kolagenu, karbomer, hydroxyetylcelulózu, glycerin, methylparaben sodný, propylparaben sodný, fenoxylethanol, vodu pro injekce a netkanou textilii. Produkt je určen pro jednorázové použití a není sterilní..

[Určené použití] : Je vhodná k péči o nechronické rány a okolí kůže.

[Vlastnosti] : Maska by měla být bílá nebo mírně žlutá, vlhká, bez zápachu, bez viditelných nečistot nebo skvrn. Musí být schopna vydržet zatížení 500 g po dobu 3 minut bez prasknutí.

[Kontraindikace] Osoby alergické na bílkovinné produkty by tento výrobek neměly používat.

Těhotné a kojící ženy by měly užívání konzultovat s lékařem.

[Pokyny] : Pro vnější použití. Po očištění pokožky otevřete vnější obal, vyjměte masku, rozložte je a přiložte na pokožku, jemně přitlačte po obvodu, aby netkaná textilie byla pevná, každých 15-30 minut, není třeba omývat. Jednou denně po dobu dvou týdnů.

[Bezpečnostní opatření]: 1. Nepoužívejte tento výrobek za následujících okolností: ① je po uplynutí doby použitelnosti výrobku; ② obal je poškozený.

2. Tento přípravek je určen pouze k vnější aplikaci na kůži, Pouze k vnějšímu použití, nesmí se užívat vnitřně.

Pokud se během používání objeví pálení, zarudnutí nebo otok, přestaňte produkt používat, opláchněte a v případě potřeby se poraďte s lékařem. 4. Tento výrobek uchovávejte mimo dosah dětí. 5. Tento výrobek se doporučuje používat samostatně. Pokud je nutné kombinované použití, poraďte se s lékařem. 6. Tento přípravek se používá k pomocné terapii kožních ran, které nevyžadují aseptický výkon.

[Upozornění] : Přečtěte si pozorně návod k použití nebo jej použijte pod dohledem lékaře.






[Balení] : Tento výrobek je balen v sáčku z hliníkové fólie, 5 kusů/krabička.

[Skladování a přeprava] Produkt uchovávejte v interiéru a přeppravujte při pokojové teplotě. Zmrazení a následné rozmrazení neovlivňuje použití..

[Datum výroby] Podrobnosti naleznete na štítku na obalu.

[Doba použitelnosti] : dva roky.

Kategorie symbolů/vysvětlivky

	Označení "CE "		Nepoužívejte, pokud je obal poškozený
	Zdravotnický prostředek		Přečtěte si návod k použití
	Katalogové číslo		Upozornění
	Číslo Šarže		Výrobce
	Datum expirace		Datum výroby
	Nesterilní		Autorizovaný zástupce
	Chraňte před slunečním zářením		Jedinečný identifikátor výrobku
	Udržujte v suchu		Nepoužívejte opakovaně



[Výrobce] : Shandong D-Nutrimec Biomedical Co., Ltd

[Výrobní adresa] : 218 meters east of the intersection of Qingnian Road and Dingdang Road in Tianzhong Street, Dingtao District, Heze City, Shandong Province, China,274100

[Tel] : 0086-530-6277775

[Email] : dnutrimec@gmail.com

EC REP

[Název]Humiss Beratung GmbH

[Adresa]Gneisenaustraße 8.40477,Düesseldorf,Deutschland

[SRN]DE-AR-000023447

Vyrobeno v Číně

[Datum revize] Jan-01-2024

Rev.:A/1