

**BONNEHEURE®**

## LÉKAŘSKÉ REKOMBINANTNÍ SÉRUM S LIDSKÝM KOLAGENEM - NÁVOD K POUŽITÍ

[Název výrobku] : Lékařské rekombinantní sérum s lidským kolagenem

[Model/Specifikace] : 5 g/láhev, 20 g/láhev, 30 g/láhev, 50 g/láhev, 80 g/láhev, 100 g/láhev.

[Složení, obsah] : Výrobek obsahuje rekombinantní typ III humanizovaného kolagenu, xanthanovou gumu, glycerin, methylparaben, fenoxylethanol a dávkovač.

[Zamýšlené použití] : Je vhodný pro péči o nechronické rány, jako je poškození kožní bariéry způsobené vědry na obličeji a okolní kůži. Používá se pouze jako mechanická bariéra.

[Vlasnosti] : Produkt by měl být bezbarvý, jednotný, viskózní gel bez viditelných nečistot. Skleněná lahvička by měla být čistá, hrdlo lahvičky by nemělo vykazovat únik kapaliny a neměly by na něm být ostré hrany nebo jiné vady.

[Kontraindikace] : Lidé alergičtí na bílkovinné produkty nesmí výrobek používat; Používejte s opatrností u těhotných a kojících žen.

[Pokyny] : Místní vnější použití. Očistěte pokožku a naneste gel , ujistěte se, že je pokryta celá plocha. Používejte dvakrát denně nebo podle pokynů lékaře po dobu dvou týdnů.

[Bezpečnostní opatření] : Nepoužívejte, pokud: Produkt je po datu expirace. Obal je poškozen.

Pouze pro vnější použití na pokožku, nepolykejte. Před použitím si důkladně umyjte ruce.

Pokud se objeví pálení, zarudnutí nebo otok, přestaňte produkt používat, opláchněte a v případě potřeby se poraďte s lékařem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Produkt je doporučeno používat samostatně. Pokud je nutná kombinace s jinými produkty, konzultujte s lékařem. Produkt je určen pro doplňkovou léčbu kožních ran, které nevyžadují aseptický zásah. Produkt by měl být spotřebován do jednoho měsíce po otevření. Nepoužívejte poškozené balení.

[Varování] : Pečlivě si přečtěte návod k použití nebo používejte pod dohledem lékaře.

















[Balení] : Výrobek je balen ve skleněných lahvičkách; 1 lahvička/krabička.

[Skladování a přeprava] : Uchovávejte na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo. Převážte při pokojové teplotě. Zmrazení a následné rozmrazení neovlivňuje použití.

[Datum výroby] : Podrobnosti naleznete na štítku na obalu.

[Doba použitelnosti] : Dva roky nebo expirace uvedena na obalu.

### Kategorie symbolů/vysvětlivky

|   |                                |   |                                       |
|---|--------------------------------|---|---------------------------------------|
|  | Označení "CE "                 |  | Nepoužívejte, pokud je obal poškozený |
|  | Zdravotnický prostředek        |  | Přečtěte si návod k použití           |
|  | Katalogové číslo               |  | Upozornění                            |
|  | Číslo šarže                    |  | Výrobce                               |
|  | Datum spotřeby                 |  | Datum výroby                          |
|  | Nesterilní                     |  | Autorizovaný zástupce                 |
|  | Chraňte před slunečním zářením |  | Jedinečný identifikátor výrobku       |
|  | Udržujte v suchu               |  | Nepoužívejte opakovaně                |



[Výrobce] Shandong D-Nutrimec Biomedical Co., Ltd

[Výrobní adresa] 218 meters east of the intersection of Qingnian Road and Dingdang Road in Tianzhong Street, Dingtao District, Heze City, Shandong Province, China,274100

[Tel] 0086-530-6277775

[Email] dnutrimec@gmail.com

**EC REP**

[Název]Humiss Beratung GmbH

[Adresa]Gneisenaustraße 8.40477,Düesseldorf,Deutschland

[SRN]DE-AR-000023447

Vyrobeno v Číně