

**BONNEHEURE®**

# LÉKAŘSKÝ REKOMBINANTNÍ LIDSKÝ KOLAGENOVÝ REPARAČNÍ SPREJ - NÁVOD K POUŽITÍ

[Název výrobku] : Lékařský rekombinantní lidský kolagenový reparační sprej

[Model/Specifikace] : 30ml/láhev

[Složení] : Tento výrobek se skládá z rekombinantního lidského kolagenu typu III, vody, glycerinu, fosforečnanu disodného, fenoxylethanolu, fosforečnanu sodného, chloridu sodného, malého množství konzervačních látek..

[Zamýšlení použití] : Hydratuje a podporuje hojení pokožky. Vhodný pro každodenní péči o pokožku.

[Vlastnosti] : Produkt by měl být bezbarvý, jednotný tekutý sprej bez viditelných nečistot. Skleněná lahvička by měla být čistá, hrdlo lahvičky by nemělo vykazovat únik kapaliny a neměly by na něm být ostré hrany nebo jiné vady.

[Kontraindikace] : Lidé alergičtí na bílkovinné produkty nesmí výrobek používat; Používejte s opatrností u těhotných a kojících žen.

[Pokyny] : Místní vnější použití, třikrát denně, nejlepší účinek nepřetržitého používání po dobu 15 dnů..

[Bezpečnostní opatření] : Nepoužívejte, pokud: Produkt je po datu expirace. Obal je poškozen.

Pouze pro vnější použití na pokožku, nepolykejte. Před použitím si důkladně umyjte ruce.

Pokud se objeví pálení, zarudnutí nebo otok, přestaňte produkt používat, opláchněte a v případě potřeby se poraďte s lékařem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Produkt je doporučeno používat samostatně. Pokud je nutná kombinace s jinými produkty, konzultujte s lékařem. Produkt je určen pro doplňkovou léčbu kožních ran, které nevyžadují aseptický zásah. Produkt by měl být spotřebován do jednoho měsíce po otevření. Nepoužívejte pokud je obal poškozen

[Upozornění] : Pečlivě si přečtěte návod k použití nebo jej používejte pod dohledem lékaře.

[Balení] : Tento výrobek je balen ve skleněných lahvičkách; 1 lahvička/krabička.

[Skladování a přeprava] Tento přípravek skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah přímého slunečního záření; Skladujte při pokojové teplotě.

[Datum výroby] : Podrobnosti naleznete na štítku na obalu.

[Doba použitelnosti] : Dva roky/datum expirace na obalu.

## Kategorie symbolů/vysvětlivky

	Označení "CE "
	Zdravotnický prostředek
	Katalogové číslo
	Číslo šarže
	Datum spotřeby
	Nesterilní
	Chraňte před slunečním zářením
	Udržujte v suchu

	Nepoužívejte, pokud je obal poškozený
	Přečtěte si návod k použití
	Upozornění
	Výrobce
	Datum výroby
	Autorizovaný zástupce
	Jedinečný identifikátor prostředku



[Výrobce] Shandong D-Nutrimec Biomedical Co., Ltd  
[Výrobní adresa] 218 meters east of the intersection of Qingnian Road and Dingdang Road in  
Tianzhong Street, Dingtao District, Heze City, Shandong Province, China,274100  
[Tel] 0086-530-6277775  
[Email] dnutrimec@gmail.com



[Název]Humiss Beratung GmbH  
[Adresa]Gneisenaustraße 8.40477,Düesseldorf,Deutschland  
[SRN]DE-AR-000023447  
Vyrobeno v Číně